

座位安定シャワーキャリー

SY-20

取扱説明書

保証書付き

このたびは、「ハビナス座位安定シャワーキャリー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解された上で正しくお使いください。なお、取扱説明書は、必ず大切に保管してください。



目

	ページ
1. おもな機能と特長	2
2. 各部位の名称	2
3. 安全にお使いいただくために	3
4. ご使用の前に	5
5. 使用前の点検	7
6. 使用方法	7

次

	ページ
7. お手入れの方法	10
8. 保管方法	10
9. 仕様	10
10. 便槽(オプション品)の取り付け	11
11. アフターサービス	11
保証書	12

本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な保守が必要です。
この取扱説明書に記載されている内容をよくお読みになり、十分にご理解された上でお使いください。
また、この取扱説明書に書かれていない使用方法是絶対に行わないでください。

1. おもな機能と特長

■本製品は歩行が困難で車いすなどを利用されている方に適するシャワー用車いすです。

浴室内で座ったまま、シャワーを浴びたり、身体を洗ったりすることができます。

※冬期にシャワー浴をされる場合には、比較的室温の高い日中をおすすめします。

■浴室で安心してご使用できます。

○シートとバックサポートが後方に傾斜しており、身体を安定して支える形状になっていますので、安定した姿勢で座ることができます。

○前方ハンドルを握ることで、使用者が安心して座ることができます。

■移乗がスムーズにできます。

○スライド収納式アームサポート付きです。

アームサポート固定ノブを引いてアームサポートを下方方向にスライドさせて収納することにより、横方向からの移乗がスムーズにできます。


○スイングアウト式フット・レッグサポート付きです。

フット・レッグサポートを開くことにより、車いす、椅子などへより近づくことができ、前方からの移乗もスムーズにできます。

また、狭いスペースでご使用される際はフット・レッグサポートを取り外すこともできます。

2. 各部位の名称

座位安定シャワーキャリー SY-20

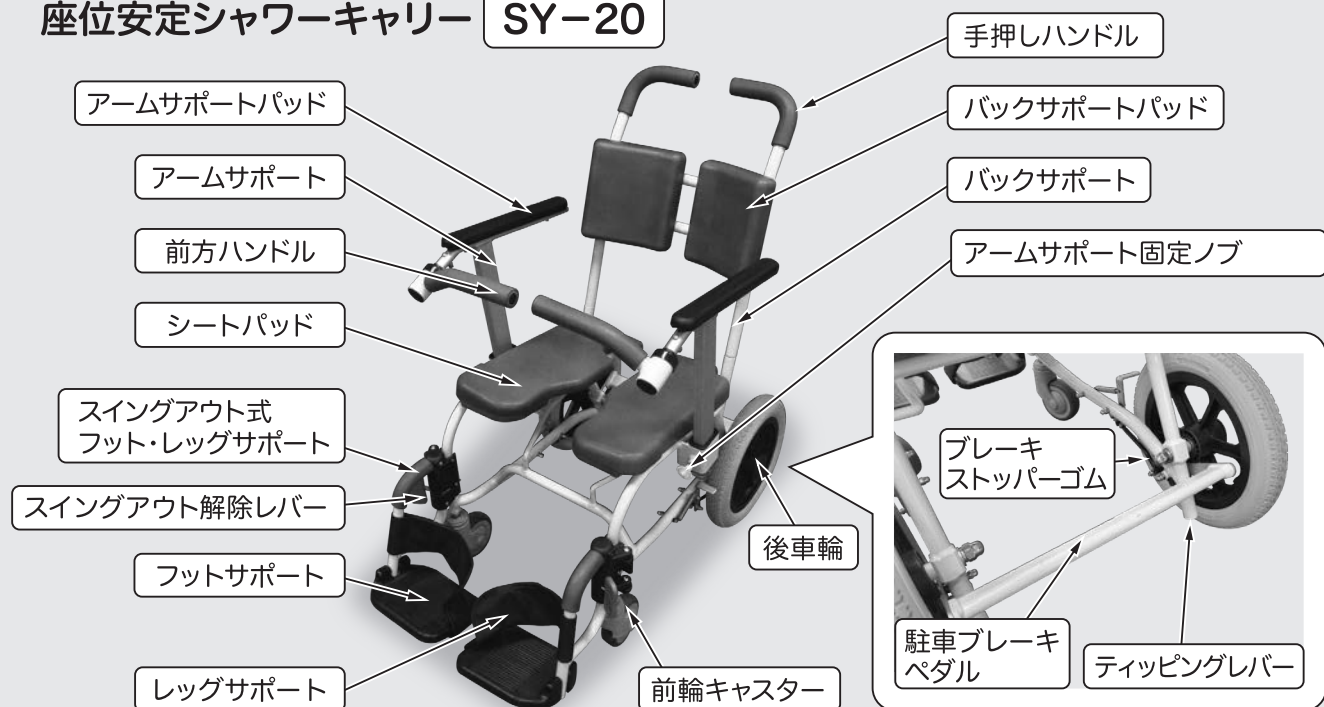

3. 安全にお使いいただくために

ここに示した注意項目は製品を安全にご使用いただき、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。取扱いの誤りによって発生するおそれのある危険に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重症を負う可能性が予想される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的障害の発生が想定される内容を示しています。



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

次の点は安全にお使いいただくために必ずお守りください。

警告

■使用者の病状について

❶ 介助者は、シャワーキャリーを使用する前に、必ず使用者の病状を確認してください。

次のような方は使用しないでください。

- ① 背中や臀部に床ずれのある方。
- ② 上半身の身体機能が著しく低下している方。
- ③ 座位がとれない方。

以上の方がご使用になりますと病状の悪化、または転倒転落事故につながるおそれがあります。

■使用方法について

△ シャワーキャリーは、浴槽につけての使用を目的としておりません。使用者の身体を洗うことを目的としています。

○ 温泉やプールなどの場所では使用しないでください。金属に悪影響を与える成分によりサビや破損の原因になります。

○ 踏み台、台車など、本来の用途以外に、使用しないでください。

○ 手押しハンドルに寄りかかったり、歩行補助用に用いたりしないでください。

○ シャワーキャリーに座ったまま、強い前傾姿勢をとらないでください。

本製品ごと転倒するおそれがあります。

❶ シャワーキャリーに付着した石鹸などは、必ず洗い流してからお乗りください。

部品の固着により動きが固くなる原因になります。

○ シャワーキャリーは1人用に設計されています。2人以上で使用しないでください。

最大使用者体重（積載物を含む）80kg

❶ 本製品の取扱いおよび操作は、必ず介助者が行ってください。

警告

- シャワーキャリーは室内で使用する入浴用車いすとして設計されています。平らな場所以外では使用しないでください。入浴・シャワー以外の目的には使用しないでください。(例:屋外用車いすなど)
- ❶ シャワーキャリーは浴室での使用がほとんどであるため常に危険と隣り合わせです。浴室の床に石鹸などの洗い残しが残っていると、使用者および介助者の転倒につながるおそれがあります。使用者はもちろん介助者の転倒もさけるため、浴室の床は十分にお手入れを行ってください。
- ❶ レッグサポート・ベルトの面ファスナーに糸くず、汚れが付いたときは取り除いてください。面ファスナーの接着力が低下し、事故の原因になります。
- 改造をしないでください。転倒転落事故の原因や本体が破損する原因になります。
- 暖房器具に本製品を近づけないでください。シートパッド部分などが燃えたり、変形したり、熱くなった金属部分でやけどをするおそれがあります。
- 小さなお子様に使用させたり遊ばせたりしないでください。

■介助について

- 介助者は、シャワーキャリーに乗って介助しないでください。転倒転落事故の原因になります。
- 座面部以外に腰掛けしないでください。座面に立ち上がらないでください。転倒転落事故の原因や本体が破損する原因になります。
- 手押しハンドル、バックサポートに重いものなどを引っ掛けしないでください。転倒転落事故の原因になります。
- 走行中にアームサポートのスライド及びフット・レッグサポートのスイングアウト操作をしないでください。転倒転落事故の原因になります。
- ❶ 使用中に、異常を感じたら即時に使用を中止してください。
- 倒れ掛かるような急激な座り方、移乗の仕方はしないでください。

■停止について

- ❶ 停止時は、必ず駐車ブレーキを掛けてください。
※(7ページ、7.使用方法1)ブレーキの掛け方、解除の方法)参照
- ❶ 駐車ブレーキを掛け忘れると、シャワーキャリーが動きだし、衝突や使用者の転倒転落事故につながるおそれがあります。

■移乗について

- ❶ 移乗する時は、必ず駐車ブレーキを掛けてください。シャワーキャリーが動きだし、転倒転落事故の原因になります。
- ❶ 移乗は平坦な場所で行ってください。バランスを崩し転倒転落事故の原因になります。
- ❶ 移乗はフット・レッグサポートを開くか、フットサポートを跳ね上げてから行ってください。
- 移乗する時は、フットサポートの上に乗らないでください。シャワーキャリーがバランスを崩し転倒転落事故の原因になります。

■段差乗り越えについて

- 前輪を100mm以上持ち上げないでください。
シャワーキャリーが不安定になり転倒転落事故につながるおそれがあります。
- 使用者を乗せたまま、シャワーキャリーを持ち上げないでください。転倒転落事故の原因や、本体の破損原因になります。

■操作について

- ❶ 使用時は必ずアームサポートを上げて使用してください。また、アームサポートが完全にロックされていることを確認してください。使用中にアームサポートが下がると、転倒転落事故の原因になります。
- ❶ スイングアウト式フット・レッグサポートのスイングアウトが完全にロックされていることを確認してください。使用中にフットサポートが開くと、転倒転落事故の原因になります。
また、使用者の足は必ずフットプレートに乗せてください。

⚠ 注意

■ 介助について

- ❶ 介助者は、使用者の身体の一部または衣服が後車輪、前輪キャスターに触れたりはさまったりしないよう、シャワーキャリーに安全に座れているかを確認してください。
- ❷ アームサポートを収納する際は、可動部に身体の一部または衣服をはさまないように注意してください。使用者のケガの原因になります。
- ❸ 浴室内などで、アームサポートを下げる際は、ゆっくり注意して下げてください。シャワーキャリーが濡れているときにアームサポートを下げようとする、急に下がる場合がありますのでご注意ください。

■ 移乗について

- ❶ 重度者の移乗、シャワーキャリーが不安定になりやすいときは、2人以上の介助者が付き添ってください。また、介助者は使用者が安定した姿勢で座っていることを確認してください。
- ❷ 移乗の際は、介助者がしっかりと使用者を支えて行ってください。

■ 段差乗り越えについて

- 段差を乗り越える時は、右図のようにティッピングレバーに足をかけ、手押しハンドルを手前に引いて前輪を持ち上げてください。ティッピングレバーを踏んで無理に前輪を持ち上げないでください。本体の破損の原因になります。



■ 操作について

走行する時は、使用者の足が壁や柱などにぶつからないように十分に注意してシャワーキャリーを操作してください。ケガの原因になります。

4. ご使用の前に

(1) 開封

以下の本体・付属品・取扱説明書が入っていることを確認してください。

● 本体




● バックサポート



● スイングアウト式 フット・レッグサポート (左右、各1点)



●付属品ポリ袋入り

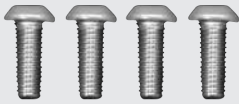


バックサポート固定ボルト… 4本



スプリングワッシャー…………… 4個



平ワッシャー…………… 4個

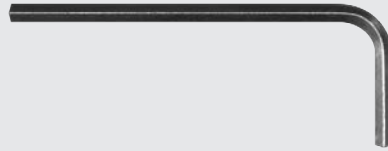


六角レンチ…………… 1本



取扱説明書(保証書付き)…1冊

(2) 組立方法

1) バックサポートの取り付け方

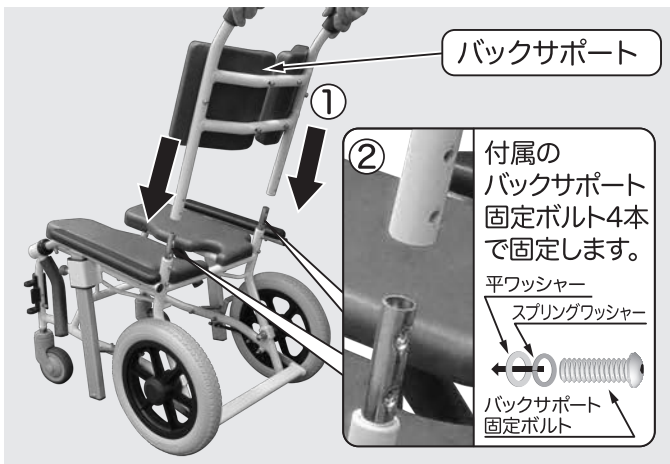

- ①本体の後方のパイプにバックサポートを差し込みます。
- ②バックサポートの後方から付属のバックサポート固定ボルトを六角レンチで締め込みます。




注意

固定ボルト4本を締め付けた後、バックサポートを手で前後に動かし、ガタつきがないことを確認してください。

2) スイングアウト式フット・レッグサポートの取り付け方

本体の前輪キャスターの上にある取り付け穴に、フット・レッグサポートのピンを差し込みます。

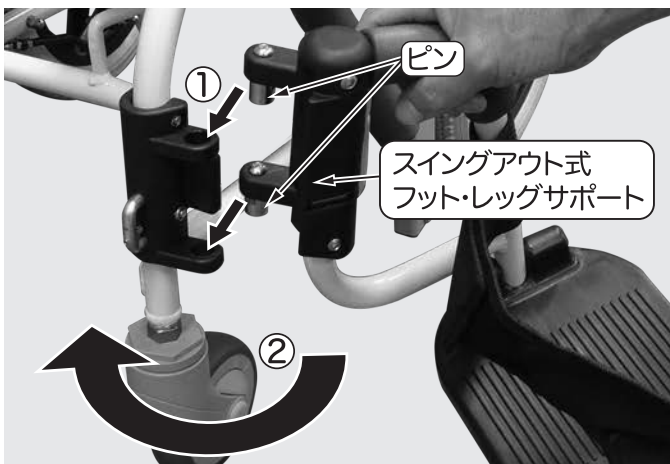

- ①フット・レッグサポートを開いた状態で、2本のピンを本体フレームの取り付け穴に同時に差し込みます。
- ②前方に回転させると自動的にロックされます。



注意

手をはさまないように注意してください。



注意

フット・レッグサポートを手で前後に動かし、ロックされていることを確認してください。

5. 使用前の点検

使用前に以下の点検を必ず行ってください。

点検を行い作動不良や今までと違う異音やガタつきがあったときには、ご使用を取りやめ、お買い上げの販売店または、ピジョンタヒラ㈱までお問い合わせください。

(1) ブレーキの作動確認

駐車ブレーキペダルの操作を行い、ブレーキが掛かることを確認してください。

(2) バックサポート・本体フレーム・シートパッドが固定されていることを確認

ガタつき、ネジの緩みがないことを確認してください。ネジが緩んでいると、ネジが脱落し、転倒転落事故につながるおそれがあります。

(3) 可動部分の確認

前輪キャスター、後車輪、駐車ブレーキペダルなどのガタつき、ネジの緩みがないことを確認してください。ネジが緩んでいると、ネジが脱落し、事故につながるおそれがあります。

(4) 消耗品、交換部品の確認

それぞれの部品が消耗・劣化した時は、早めに交換してください。

新しい部品に交換する際は、お買い上げの販売店または、ピジョンタヒラ㈱へご連絡ください。



注意

交換時期を過ぎての使用は、転落、転倒、衝突などの事故につながるおそれがあります。それぞれの部品が交換時期になったときは、お早めに交換してください。

消耗品・交換部品

部 品 名	交 換 時 期
後車輪	タイヤの表面に溝がなくなったとき。表面がひび割れたとき。
前輪キャスター	しっかり取り付いていてもガタガタするとき。表面がひび割れたとき。
シートパッド・バックサポートパッド・アームサポートパッド・手押しハンドル・前方ハンドル・レッグサポート	ほつれ、切れ目が発生したとき。ひどく汚れたとき。
ブレーキストッパーゴム	ブレーキストッパーゴムに切れ目が発生したとき。

6. 使用方法



1) 駐車ブレーキの掛け方、解除の方法

〈駐車ブレーキを掛けるとき〉

駐車ブレーキペダルを矢印の方向に踏み込むとブレーキが掛かります。

〈駐車ブレーキを解除するとき〉

戻すとブレーキが解除されます。



注意

ブレーキが掛かることを確認してください。停止時は必ず駐車ブレーキを掛けてください。駐車ブレーキを掛ける際にブレーキペダルを必要以上に強く踏んだり、体重をかけたりしないでください。

2) 前方ハンドルの取扱い方法

前方ハンドルは外側に回転して収納されます。内側に回転させると所定の位置で止まります。

〈前方ハンドルを開くとき〉

前方ハンドルを外側に回転させると開きます。



〈前方ハンドルを閉じるとき〉


前方ハンドルを内側に回転させると閉じます。所定の位置で止まります。



注意

使用者の乗車中は、前方ハンドルを閉じて使用してください。

3) アームサポートの取扱い方法

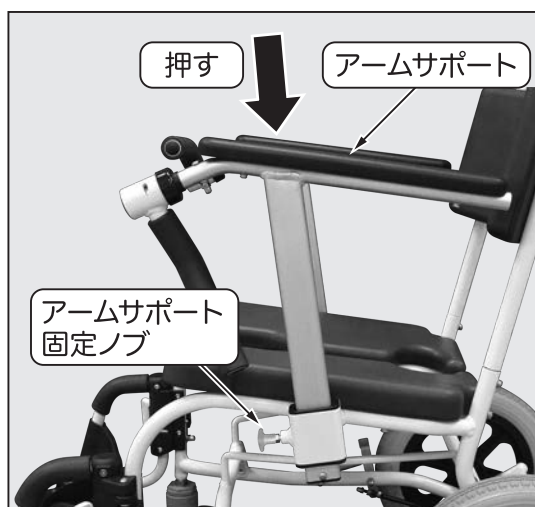

〈アームサポートを下げるとき〉

前方ハンドルが外側に開いていることを確認してください。下げる際は、アームサポートの支柱根元に設けられたアームサポート固定ノブを引き、ゆっくり下げてください。




注意

アームサポートを下げるときは、前方ハンドルを外側に開いてから下げてください。



注意

シャワーキャリーが濡れているときにアームサポートを下げようとする、急に下がることがありますのでご注意ください。

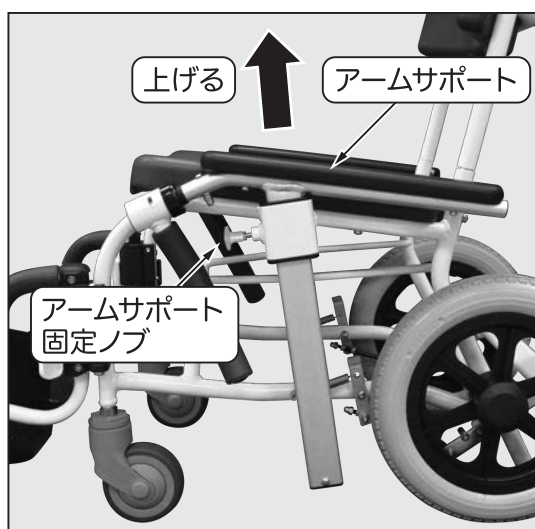

〈アームサポートを引き上げるとき〉

矢印の方向へ引き上げ、ロックする高さまでゆっくり上げてください。



注意

アームサポートを手で上下に動かし、ロックされたことを確認してください。



注意

アームサポートを下げる時、介助者または使用者の腕や手、指がスライドするアームサポートと座面の間に挟まれないように注意してください。



注意

アームサポートが上下する動きは、乾いた状態と濡れた状態では、かたさが異なります。

4) フット・レッグサポートの取扱い方法

フット・レッグサポートは外側に開くことや、取り外すことができます。



〈開く・閉じるとき〉

開く: スイングアウト解除レバーを矢印の方向に押しながらフット・レッグサポート部を外側に回転させます。

閉じる: 内側に回転させるとフット・レッグサポートが閉じ、自動的にロックされます。

〈取り外すとき〉

フット・レッグサポートは、開いた状態で上方に持ち上げると取り外すことができます。

〈取り付けるとき〉

組立方法と同様に取り付けてください。
(6ページ2)スイングアウト式フット・レッグサポートの取り付け方参照



注意

使用者の乗車中はフット・レッグサポートを閉じ、確実にロックされていることを確認してください。足を乗せた状態で開きますとケガの原因になります。



注意

フット・レッグサポートの開閉や取り付け取り外しの操作は、介助者の手や使用者の身体を傷めないように注意してください。

5) フットサポートの取扱い方法

フットサポートを跳ね上げることができます。



矢印の方向に跳ね上げます。
下げると元の位置に戻ります。



注意

フットサポートの上に足を乗せて乗り込んだり、降りたりしないでください。シャワーキャリーがバランスを崩し転倒転落事故の原因になります。

7. お手入れの方法

(1) 使用後、石けんやシャンプー、入浴剤などを洗い流してください。

汚れのひどい場合は、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭き、汚れをきれいに拭き取ってください。

(2) 最後に、固く絞った布で水分を拭き取り、日陰の通気性の良い所で乾燥させてください。



注意

塩素系薬剤、酸性・アルカリ性薬剤、シンナー・ベンジンによる殺菌・消毒や、温泉水・硫黄系入浴剤をかけての使用はしないでください。パイプの腐食の原因や樹脂部品の劣化につながり、破損してケガをする原因になります。



注意

タワシ等の他道具類やクレンザー等研磨剤入り薬剤類は使用しないでください。樹脂部品が劣化または、破損してケガをする原因になります。



注意

直射日光は当てないでください。樹脂部品が劣化(変形または変質)し、破損してケガをする原因になります。

8. 保管方法

(1) 水分をよく拭き取り保管してください。

(2) 事故、サビ、樹脂部品の劣化をさけるため、いたずらされるおそれのある場所、ストーブの前などの高温になる場所、雨風の当たる場所、湿気が多い場所や室温が上がる場所、直射日光のあたる場所には放置しないでください。

9. 仕様

型 式	SY-20
フレーム材質	アルミ(塗装)
パッド材質(シート・バックサポート・手押しハンドル)	発泡ウレタン
前 輪 × 後 車 輪	4インチ×12インチ
前 座 高	450mm
後 座 高	390mm
座 幅	400mm
座 奥 行	400mm
バックサポートパッド高(シートパッドから)	375mm
アームサポート高(シートパッドから)	255mm
手 押 し ハ ン ド ル 高	882mm
全 幅	509mm
全 高	882mm
全 長	880mm
重 量	15kg

※製品は、品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。ご了承ください。

10. 便槽(オプション品)の取り付け

※便槽の取り付け・取り外しを行う時は、必ず駐車ブレーキを掛けてください。

下図のように、便槽を両手で持ち、便槽取り付けステイに沿って、便槽が止まる位置まで押し込みます。



11. アフターサービス

この製品についてのお問い合わせ

ご意見、ご質問は、お買い上げの販売店または、ピジョンタヒラ(株)へお申しつけください。

修理を依頼されるには

お買い上げの販売店に、この製品の品名、シリアル番号、および故障状況をくわしくご連絡の上、お申しつけください。転居、贈答品などでお買い上げの販売店に修理を依頼することができない場合は、ピジョンタヒラ(株)までお問い合わせください。

製品の保証について

(1) 保証内容につきましては、次のページの保証書をご覧ください。

(2) 保証期間終了後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

ピジョンタヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル
ピジョンタヒラ(代表)

TEL 03-3661-4371

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

ピジョンタヒラホームページは
<http://www.pigeontahira.co.jp>

ピジョン株式会社

〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4
ピジョンお客様相談室

TEL 0120-741-887

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

ピジョンホームページは
<https://pigeon.info/>

保証書

1. 本書は、本書記載の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、下記の販売店に修理をご依頼ください。
2. 保証期間は、お買い上げ後、1年間です。
3. 保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った「正常な使用状態」において故障した場合には、無償修理をいたします。ただし、キャスター・タイヤの摩耗やパッドの破れ、ハンドルやレッグサポートのクッションなど、交換時期となった取扱説明書記載の消耗品・交換部品は除きます。
4. 保証期間内でも次の場合は、有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷
 - (4) 一般家庭・施設・病院用以外に使用された場合の故障および損傷
 - (5) 本書の提示がない場合
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、ご住所の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間終了後の修理についてご不明な場合は、販売店にお問合わせください。

※保証期間終了後の修理については、取扱説明書をご覧ください。

製品名		シリアル番号	保証期間
座位安定シャワーキャリー			お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日	
	ご住所 〒	TEL	
販売店	店名	TEL	
	住所 ※1		

※1 お買い上げ時のレシート添付でも有効

ピジョンタヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル
ピジョンタヒラ(代表)

TEL 03-3661-4371

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

ピジョンタヒラホームページは
<http://www.pigeontahira.co.jp>

ピジョン株式会社

〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4
ピジョンお客様相談室

TEL 0120-741-887

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

ピジョンホームページは
<https://pigeon.info/>