

# 保証書

商品名 ユニットケアポーター

1. 本書は、本書記載の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、下記販売店に修理をご依頼ください。
2. 保証期間は、お買い上げ後1年間です。
3. 保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った「正常な使用状態」において故障した場合には、無償修理をいたします。
4. 保証期間内でも、次の場合は有償修理になります。
  - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、地変による故障および損傷
  - (4) 一般家庭・施設・病院用以外に使用された場合の故障および損傷
  - (5) 本書の提示がない場合
  - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、ご住所の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間終了後の修理についてご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。

## ピジョンタヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル  
 TEL 03 (3661) 4371 (代表) 受付時間 9時~17時(土・日・祝日を除く)  
 ピジョンタヒラホームページは <http://pigeontahira.co.jp>

下記※印欄にご記入のない場合は無効となります。必ずご記入ください。

お客様		※ 販売店
ご住所 〒	—	
お電話	— —	
お名前	様	
※お買上げ年月日	年 月 日	
		※お買上げ時のレシート添付でも有効

# ユニットケアポーター

## 取扱説明書

このたびは、ハビナス「ユニットケアポーター」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書には、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

**ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。**  
**なお、取扱説明書は、必ず大切に保管してください。**

目次	
1. おもな特長と機能	2
2. 各部の名称・包装内容	2
3. 警告・注意マーク	3
4. 安全にお使いいただくために	3
5. 機能説明及び使用方法	4
6. お手入れの方法	6
7. 仕様	6
8. アフターサービスについて	7
保証書	8



※商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 1 おもな特長と機能


### ◎特長

- おむつ交換に必要なものをコンパクトに収納し、ベッドサイドまで持ち込めます。
- おむつやゴミ箱が外から見えないすっきりとしたデザインで、プライバシーの確保とケアの合理性を追求しました。

### ◎機能


- コンパクト設計により小回りがききます。
- 上段におむつや用品を収納することができます。
- 下段にゴミを入れられます。
- サイドポケットに陰洗ボトルを収納できます。
- 動かさない時はトイレなどに置いて、物入れやゴミ箱としてお使いいただけます。


## 2 各部の名称・包装内容

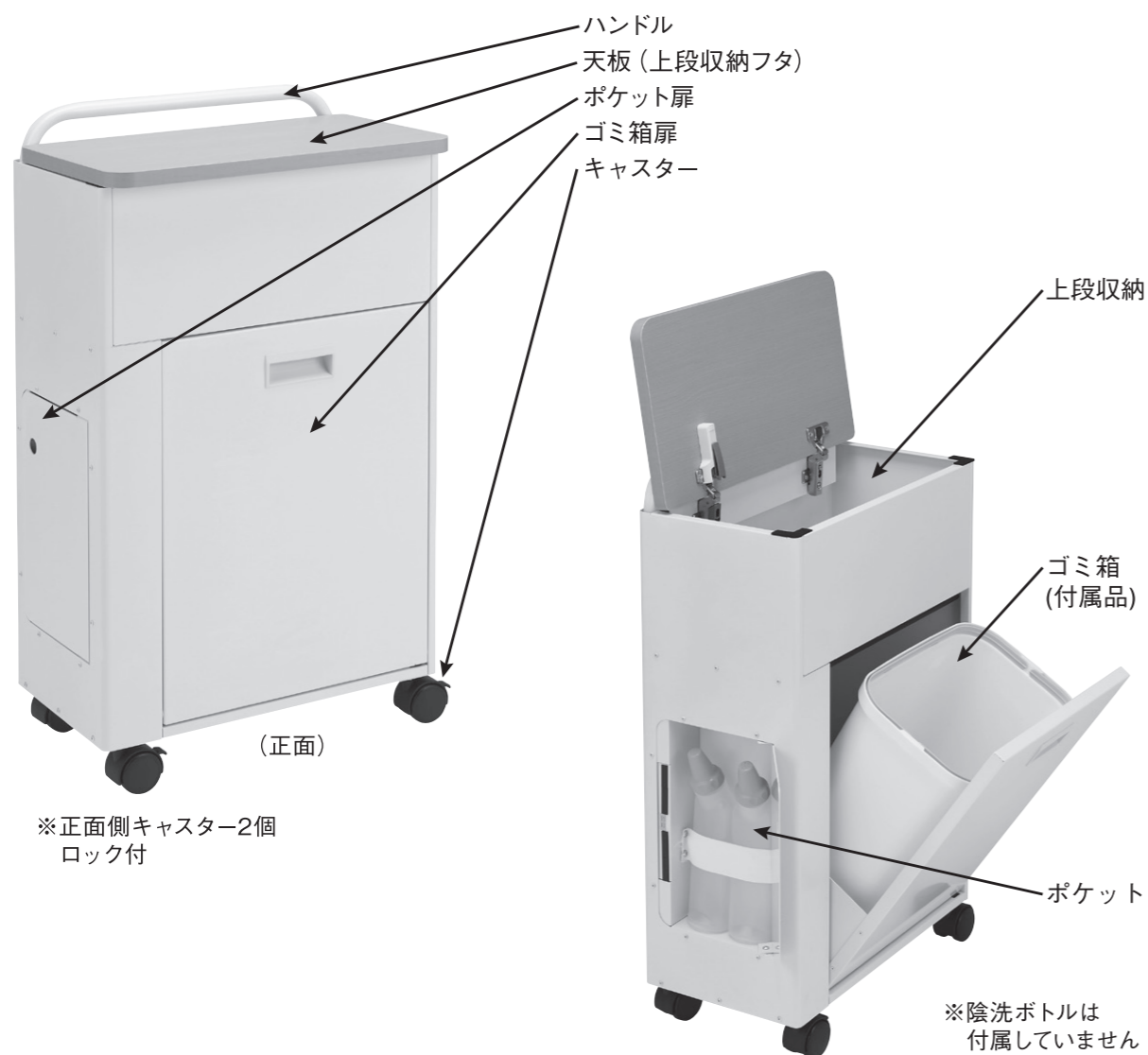



## 3 警告・注意マーク


製品を安全にお使いいただき、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。取扱いの誤りによって、発生する恐れのある危険に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** けいこく この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が予想される内容を示しています。

 **注意** ちゅうい この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的障害の発生が想定される内容を示しています。

 警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。


## 4 安全にお使いいただくために



次の点は安全にお使いいただくために必ずお守りください。

### 使用上の注意 △注意

- ❗ 作業を行う際や、保管する際は必ずキャスターロックをかけてください。突然動き出し思わぬ事故につながる可能性があります。
- ⊙ 屋外に放置したり、長時間直射日光に当てないでください。色あせの原因となります。
- ⊙ 火気に近づけないでください。火災や変形の原因となります。
- ❗ 各部のねじ、リベットがゆるんでないか定期的に点検してください。本体が正常に機能せず、破損またはケガをする恐れがあります。
- ⊙ ハンドルに物を掛けて使用しないでください。後方に転倒する恐れがあります。
- ⊙ いきおいよく段差にぶつかる・乗り上げることはしないでください。転倒や破損の恐れがあります。
- ❗ 走行する際は必ず本体の背面でハンドルを握り、写真1の→(矢印)の方向に動かしてください。転倒し破損またはケガをする恐れがあります。
- ⊙ 走行する際は写真2の→(矢印)の方向には動かさないでください。転倒し破損またはケガをする恐れがあります。

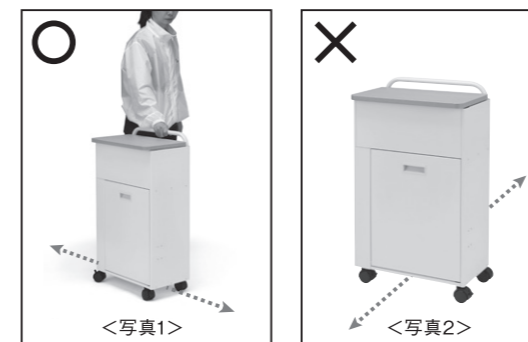

### 目的外の使用禁止 △注意

- ⊙ 本製品を、踏み台・人の搬送などに使用しないでください。

## 5 機能説明及び使用方法

### 1. 天板

天板の上に清拭剤やおしりふきなど、おむつ交換に必要な物を置くことができます。



❗ 合計3kg以上の物を置かないでください。天板や本体が破損する恐れがあります。



### 2. 上段収納

おむつや清拭剤、おしりふきなど、おむつ交換に必要な物を入れられます。




❗ 天板（上段収納フタ）は必ずフチを持って開閉してください。手をはさむ恐れがあります。



❗ ハンドルに手をかけたまま天板（上段収納フタ）を開けないでください。手をはさむ恐れがあります。

### 3. ポケット

陰洗ボトルなどを収納できます。  
※扉の穴に指を掛けながら開閉してください。  
※陰洗ボトルは付属していません。

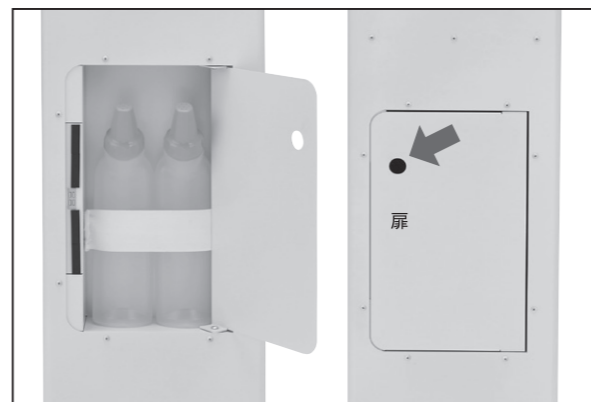

### 4. ゴミ箱

下段はゴミを入れられるスペースです。  
（ゴミ箱容量25L）  
ゴミ箱は取り外し可能です。



❗ 扉は必ず取っ手を持って開閉してください。扉が破損する恐れがあります。



❗ 扉の開閉、ゴミ箱の出し入れは必ずキャスターのロックを掛けてから行ってください。転倒の恐れがあります。



❗ 25Lを超えるゴミを入れしないでください。扉の破損、またはケガの恐れがあります。



### 5. キャスター

正面側のキャスター2個はロック付きです。  
ストッパーを踏むと固定されます。  
上げるとロックが解除されます。



❗ 作業を行う際や、保管する際は必ずキャスターのロックを掛けてください。突然動きだし思わぬ事故につながる可能性があります。



## 6 お手入れの方法

●清潔にお使いいただくために、お手入れをしてください●

### 1. 本体フレーム、天板のお手入れ

- ①本体フレーム、天板の汚れは、タオルかスポンジに中性洗剤を含ませ拭き取ってください。  
拭き取った後は乾いた布で水分を取り除いてください。
- ②水などがかった場合は、乾いた布で水分を取り除いてください。

### 2. ゴミ箱のお手入れ

プラスチック部品の汚れは、中性洗剤でおとしてください。



⊖シンナー、ベンジンなどの薬剤の使用は避けてください。変形や変色する恐れがあります。

## 7 仕様

項目	仕様	
材質	本体	スチール・アルミ
	天板	ポリ板
	ゴミ箱	ポリプロピレン
寸法	全高	885mm
	全幅	260mm
	全長	485mm
	上段収納高	230mm
	ゴミ箱	容量 25L
	キャスター	φ53.5mm
	重量	12.0kg

付属品：ゴミ箱

※尚、商品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。



## 8 アフターサービスについて

### この商品についてのお問い合わせ

ご意見、ご質問は、お買い上げの販売店または、ピジョンタヒラ（株）へお申しつけください。

### 修理を依頼されるには

お買い上げの販売店に、この商品の品名および故障状況をくわしくご連絡の上、お申しつけください。転居、贈答品などでお買い上げの販売店に修理を依頼することができない場合は、ピジョンタヒラ（株）へお問い合わせください。

### 商品の保証について

- (1)保証内容につきましては、裏面の保証書をご覧ください。
- (2)保証期間終了後の修理については、販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

### ピジョン タヒラ株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-4 ピジョンビル  
TEL 03 (3661) 4371 (代表) 受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)  
ピジョンタヒラホームページは <http://pigeontahira.co.jp>